



SKY 50/10 GENESI M












Cod. D-SK150-040-M

Compresseur sec silencieux, débit 120 l/min @ 5 bar, réservoir 40 L, avec sécheur à membrane nouvelle génération capable de délivrer de l'air sec jusqu'à -20°C de point de rosée.


 Utilisation simultanée maximale: 1

 Nombre d'unités: 2

Medical Device CE 0425

										
sSécheur	Capacité en air	Débit à @ 5bar	Moteur	Tension Hz	Réservoir	Niveau sonore	Cycle de marche	max P.	Taille	Poids net
Oui	m ³ /min l/min 0.18 180	m ³ /min l/min 0.135 135	kW 1.1	230V 50Hz	l 40	db(A) 55	50 %	bar 7	mm 710x460x890	Kg 46

Performances de livraison d'air

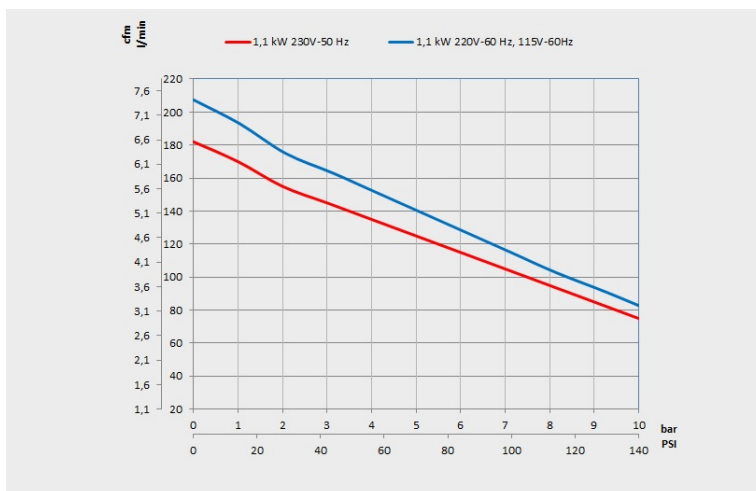

Kit de maintenance

Kit	Description	Type	Heures
TA-FL-024-K-SCC	Kit d'entretien courant GENESI M Kit d'entretien ordinaire pour compresseurs GENESI, avec sécheur. Le kit comprend les cartouches de la batterie de filtration du sécheur (2 cartouches : 5 + 0,01 micron) et les joints toriques correspondants, le filtre d'aspiration de l'élément de pompage et le tampon du clapet anti-retour. Le remplacement annuel des composants du kit est recommandé. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées à une fréquence plus élevée si l'environnement dans lequel fonctionne le compresseur est particulièrement sale.	Ordinaire	1.000h/1y
MG-GC-011-K	Kit d'entretien extraordinaire GENESI S et M Le kit de pièces détachées d'entretien extraordinaire GENESI comprend : un filtre d'aspiration, deux bagues élastiques, des joints toriques, une cartouche filtrante de ligne et deux plaques à clapets complètes. Les intervalles d'entretien recommandés pour ce compresseur sont de 1 500 heures / 2 ans. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées à une fréquence plus élevée si l'environnement dans lequel fonctionne le compresseur est particulièrement sale.	Extraordinaire	1.500h/2y